



I.N.S.C.B.

L'INSTITUT NORD-SUD de COOPERATION BIOPHARMACEUTIQUE

PRESENTE

BLISTIGEL

***Un dispositif médical innovant pour
l'administration orale des médicaments***

**UN PROGRES DANS
L'ADMINISTRATION
DES COMPRIMES ECRASES**



- **Préparation plus facile**
- **Administration précise des doses**
- **1 Sachet unique par patient**
- **Ecrasement confiné et sécurisé**
- **Traçabilité du traitement**



BLISTIGEL

EST UN DISPOSITIF D'ADMINISTRATION DES COMPRIMÉS DESTINÉ AUX PATIENTS PRESENTANT DES TROUBLES DE LA DEGLUTITION

Les troubles de la déglutition
ou dysphagie,
concernent notamment les thérapeutiques
gériatriques, pédiatriques,
psycho-comportementales,
ou certaines pathologies de la **sphère ORL**

Pour **100%** de ces patients ,
leurs comprimés sont systématiquement
écrasés, et ce, **3 fois par jour...**

ils sont administrés avec un **véhicule**,
(eau gélifiée, alimentation, boisson...)

PROBLEMES LIÉS À LA PRÉPARATION ET À L'ADMINISTRATION DES COMPRIMÉS ÉCRASÉS...

*... RISQUES POTENTIELS
POUR LE PATIENT
ET LE PERSONNEL SOIGNANT*

⇒ **SOUS-DOSAGE**
(prise partielle du traitement)

⇒ **VARIABILITÉ DU DÉLAI ENTRE
PRÉPARATION ET ADMINISTRATION**

⇒ **STOCKAGE À L'AIR LIBRE ENTRE
PRÉPARATION ET ADMINISTRATION**

⇒ **INTERACTIONS
MÉDICAMENTS-VEHICULE**

⇒ **DEFAUTS DE TRAÇABILITÉ**
(identifications traitements / patients)

⇒ **ACCIDENT ALLERGIQUE PROFESSIONNEL...**





BLISTIGEL EST LA SOLUTION

Sachet double compartiment permettant le mélange des comprimés écrasés avec un gel alimentaire

C'est un 2 en 1 :

1 seul produit est utilisé pour la préparation et l'administration des médicaments

Observance du traitement

- Pas de perte de produit lors du mélange
- Totalité du produit administré grâce au faible volume
- Absence du risque de fausse route grâce à la texture du gel
- Administration directe du traitement à partir du dispositif
- Adaptation au goût du patient grâce aux saveurs multiples
- Absence de stockage à l'air libre de la poudre écrasée

Sécurité


- Dispositif à usage unique
- Etiquette d'identification permettant la traçabilité
- Interactions chimiques limitées grâce au gel neutre
- Absence du risque d'inhalation de poudre à l'écrasement

Manipulation simplifiée


- 1 seul contenant pour médicament et gel alimentaire
- Temps de préparation réduit
- Ecrasement des comprimés directement dans le dispositif



Protocole d'utilisation

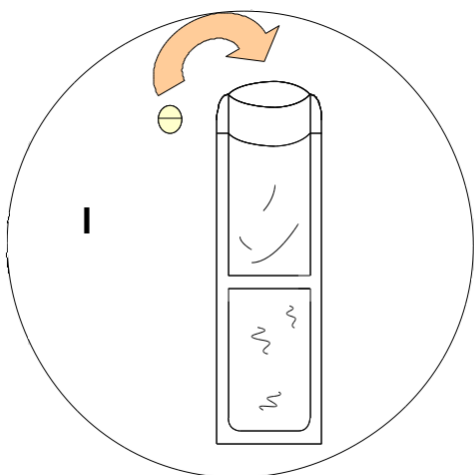


I - Introduire le(s) comprimé(s)
à l'intérieur du compartiment
vide du sachet

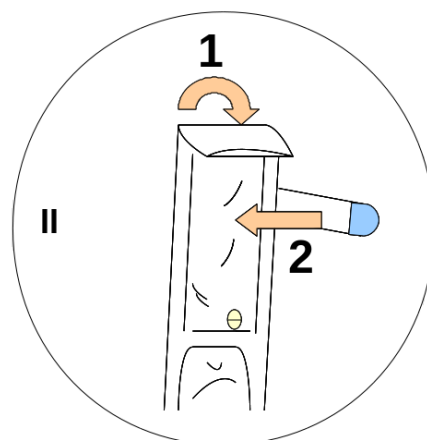


II- 1 Plier

II- 2 Fermer avec le système de
lanquette collant repositionnable

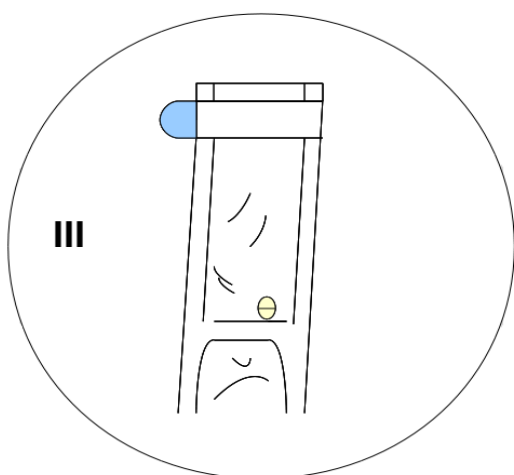



III

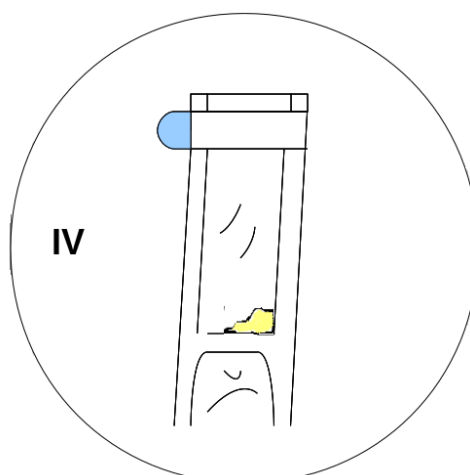

IV

III - Le dispositif est hermétiquement fermé.

IV - Broyer directement le(s) comprimé(s) contenu(s) dans le
compartiment du sachet à l'aide d'un broyeur à comprimés
de votre choix (presses, pilons...)

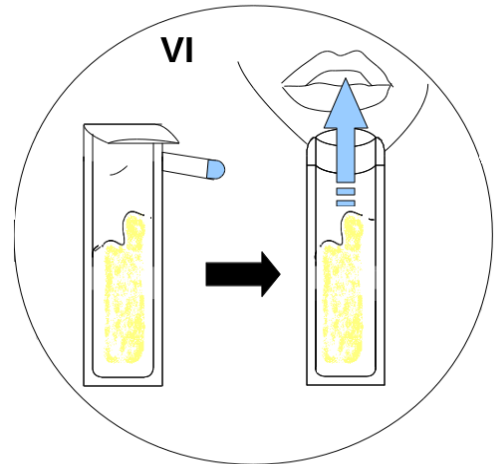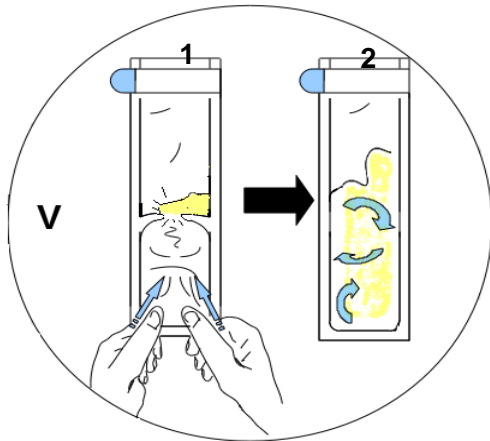

V-1 Exercer une pression manuelle de bas en haut permettant ainsi le décroissement de la soudure pelable afin que le gel puisse se mélanger au(x) comprimé(s) écrasé(s)

V-2 Malaxer généreusement l'ensemble de la préparation afin d'obtenir un mélange homogène

VI-1 Ouvrir le sachet avec la langue


VI-2 Le mélange est prêt à être administré au patient

ETIQUETTE D'IDENTIFICATION « PATIENT »

**COLLEE SUR LA PARTIE
GEL DU SACHET POUR
GARANTIR LA
TRAÇABILITE**

Indique :

- **NOM**
- **PRENOM**
- **DATE DE NAISSANCE**
- **N° DE CHAMBRE**
- **etc...**

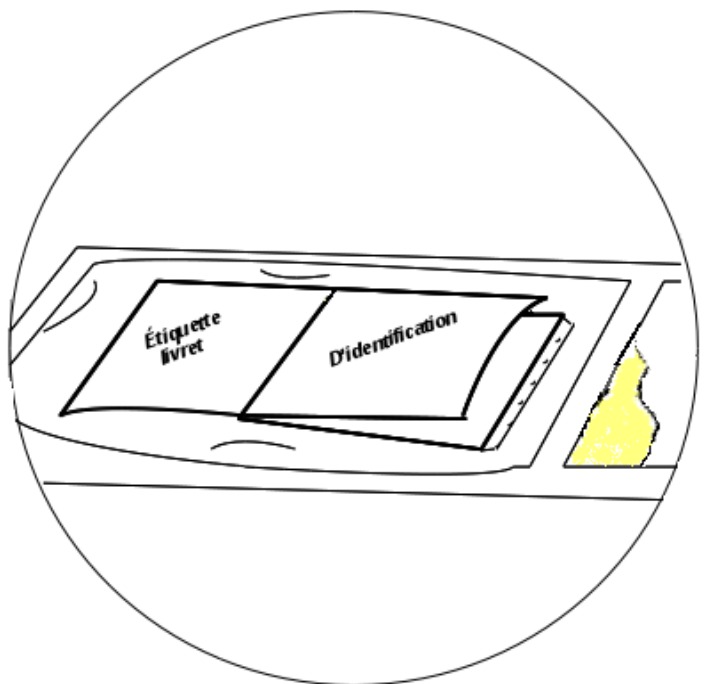



BLISTIGEL

***Sachet 2 en 1 permettant
l'administration des comprimés écrasés***

***EST UN DISPOSITIF MÉDICAL de type I
bénéficiant du marquage C.E.***

***C'EST UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE
PAR L' INSCB***

DISPONIBLE POUR LICENCE EXCLUSIVE

CONTACT :

**INSCB
CNRS – Incubateur
1919 Route de Mende
34293 Montpellier Cedex 5**

Tel : +33 (0) 672 042 888

E-mail : contact@inscb.org